



CAD/CAM冠用材料(V) 健保適用
松風ブロック PEEK

S-WAVE

新色“ホワイト”登場

SHOFU BLOCK
PEEK

大白歯保険適用 CAD/CAM 冠用材料(V)



NEW LINEUP

ホワイトがラインアップ追加!

ご好評いただいております松風ブロックPEEKに新色のホワイトを追加発売いたします。症例に合わせてホワイト・アイボリーの2色よりご選択いただけます。

症例に合わせて色調選択が可能に



□ ホワイト



□ アイボリー

SHOFU INC.

保険適用 PEEK冠を接着する場合

PEEK冠の接着には、サンドブラスト処理と前処理材の塗布を行い、
接着性レジンセメントで接着する必要があります。

**必ずサンドブラスト処理
してください。**

CAD/CAM冠用材料 (V) の
保険適用必須要件です。

SHOFU BLOCK
PEEK



アイボリー

内面処理

**CAD/CAM
レジン用アドヒーシブ**

(内面処理加算45点) ※ 保険適用必須要件

歯科レジン用接着材料

レジンセメントと併用することで
PEEK冠の強固な接着が可能。

■ PEEKに対するせん断接着強さ

初期

29.7MPa

(サーマルサイクル5000回後: 29.6MPa)

※ 自社試験結果【代表値】

※ 使用レジンセメント: ビューティリンクSA



セメント塗布

ビューティリンクSA

推奨レジンセメント

※ 接着性レジンセメントの使用が
保険適用必須要件



支台歯処理

**ビューティボンド
Xtreme**


1液型のボンディング材

※ より高い接着性能を発揮させる
ためご使用ください。



CAD/CAM冠用材料 (I) ~ (IV) 同様、松風ブロッ
クPEEKにも無機フィラーが含有されていますが、素
材が異なるため通常のシランカップリング剤では十
分な接着強さが得られません。松風ブロックPEEKを
構成する樹脂成分に対し、すぐれた濡れ性を有し高
い接着強さを発現する前処理材として、「CAD/CAM
レジン用アドヒーシブ」をご使用ください。

包装

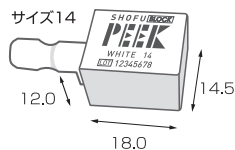

松風ブロック PEEK

[サイズ] 1種: サイズ14

[色 調] 2色: ホワイト、アイボリー

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
松風ブロック PEEK	歯科切削加工用レジン材料	管理医療機器 医療機器認証番号 303AGBZX00083A01

取扱い店

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口 (075) 778-5482 受付時間 8:30~12:00 12:45~17:00 (土日祝除く) www.shofu.co.jp

● 支社: 東京 (03) 3832-4366 ● 営業所: 札幌 (011) 232-1114 / 仙台 (022) 713-9301 / 名古屋 (052) 709-7688 / 京都 (075) 757-6968 / 大阪 (06) 6330-4182 / 福岡 (092) 472-7595